



| | |
|--|---|
| Nombre del trámite: | ENTOMOLOGÍA. IDENTIFICACIÓN DE EJEMPLARES, VIGILANCIA |
| Descripción: | Técnica de búsqueda e identificación macroscópica y microscópica de artrópodos de importancia en salud pública en nuestro país. |
| Detalles: | <p>Métodos: Observación macro y microscópica.</p> <p>Tipo de muestra: Ejemplar de artrópodos. Larvas y pupas vivas en la misma agua de la colecta, Larvas y pupas muertas en etanol 70% y adultos un ejemplar por frasco con algodón o papel absorbente suave.</p> <p>Criterio de aceptación, almacenamiento y transporte: Almacenar en frascos plásticos boca ancha en lugar fresco a temperatura ambiente. Transportar a temperatura ambiente. Tiempo total de estabilidad es de 17 días.</p> <p>Criterios de rechazo: Muestra sin formulario. Tubos con rótulos inadecuados o sin rotular. Tubo primario quebrado. Muestra derramada en contenedor secundario. Identificación del formulario no coincide con datos de la muestra. Muestras fuera de rango de temperatura solicitada e incumplimiento en tiempo de toma de muestra.</p> <p>Código interno: 2330069</p> |
| Beneficiarios | Usuarios públicos y privados derivados de centros asistenciales o especialistas. |
| Documentos requeridos: | <p>Utilizar formulario según corresponda SEREMI o PARTICULARES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulario Antecedentes muestras - CULÍCIDOS – SEREMI. - Formulario Antecedentes muestras - TRIATOMINOS – SEREMI. - Formulario Antecedentes muestras - OVITRAMPAS – SEREMI. - Formulario Antecedentes muestras - OTRAS IDENTIFICACIONES- SEREMI. - Formulario envío muestras Otras identificaciones – PARTICULARES. |
| Paso a paso: como realizar el trámite en Oficina | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reunir los antecedentes mencionados en el punto anterior. 2. Diríjase a la Sección Recepción y Toma de Muestras del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), Av. Marathon N°1000. Ñuñoa Santiago. |



| | |
|---|--|
| <p>Paso a paso: como realizar el trámite en Oficina</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Horario Toma de Muestras: No aplica. • Horario Recepción de Muestras: 8:00 a 17:00 hrs. de lunes a jueves; viernes de 8:00 a 16:00 hrs. <ol style="list-style-type: none"> 3. Si la muestra es enviada por estafeta o courier, hacer entrega de la documentación requerida en recepción, quienes le entregaran un comprobante de recepción de muestras. 4. Diríjase a caja ubicada en el mismo piso, a cancelar el arancel, eximiendo a aquellos con que exista un convenio, presentando el comprobante de recepción de muestras correspondiente. 5. El laboratorio del ISP, al cual se envía la muestra recepcionada en conformidad (cumple requisitos técnicos y administrativos), efectuará el proceso analítico requerido según corresponda. 6. Los informes de resultados, serán enviados vía email. 7. Consultas vía online en plataforma OIRS https://siac.ispch.gob.cl/ES/AtencionCiudadana/OIRS |
| <p>Tiempo realización:</p> | <p>Ovitrampas: 30 días hábiles Culícidos: 40 días hábiles Triatominos: 40 días hábiles Otras identificaciones: 40 días hábiles</p> |
| <p>Vigencia:</p> | <p>De acuerdo con la indicación específica.</p> |
| <p>Costo:</p> | <p>Ver Costo</p> |
| <p>Marco legal:</p> | <p>Decreto Fuerza Ley N° 1 de 2005. Artículos 9 y 57</p> |