

Nombre del trámite	ESTUDIO DE MALARIA VIGILANCIA
Código	2330090
Descripción	Algoritmo diagnóstico basado en la búsqueda directa del parásito, sus fracciones antigénicas o ADN, mediante observación microscópica de tinciones, inmunocromatografía y Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) para llegar a la identificación de especie.
Detalles	<p>Ensayos: Búsqueda directa del parásito, sus fracciones antigénicas o ADN.</p> <p>Métodos:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tinción Giemsa, identificación de especie y cuantificación de carga parasitaria. – Pruebas de diagnóstico rápido, Reacción de la Polimerasa en cadena (PCR) y PCR en tiempo real (cuantitativo). <p>Tipo de Muestra:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tinción Giemsa, identificación de especie y cuantificación de carga parasitaria: 2 frotis sanguíneos y 2 gotas gruesas sin teñir (Ver instructivo). – Test Rápido Cromatográfico y PCR: Sangre Total con EDTA 5 ml. <p>Requisitos previos: La sensibilidad de los métodos es mayor si la muestra es obtenida durante los aumentos de temperatura corporal</p> <p>Criterio de aceptación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muestra correctamente identificada (frasco y formulario). • Frasco rotulado con nombre completo del paciente. • Tubo plástico estéril con tapa rosca. <p>Condiciones de almacenamiento y transporte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Almacenamiento: conservar la muestra de sangre entre 2 y 8°C hasta 14 días. La estabilidad de la muestra es de 17 días. Las láminas deben guardarse en un lugar fresco y seco libre de polvo. • Transporte: triple embalaje entre 2 y 8°C. <p>Criterio de rechazo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muestra sin formulario de solicitud. • Tubos o recipientes sin rotular o con rótulo inadecuado. • Recipientes primarios quebrados o muestra derramada en el contenedor secundario. • Discordancia entre la identificación del formulario y los datos de la muestra. • Muestra fuera del rango de temperatura solicitado. • Incumplimiento del tiempo de toma de muestra.
Beneficiarios	Usuarios públicos y privados procedentes de los centros asistenciales o especialistas.
Documentos requeridos	Formulario de Envío de Muestras Estudio de Infecciones por Especies de <i>Plasmodium</i> (Malaria) – Sección Parasitología
Paso a paso: ¿cómo realizar el trámite?	<p>1. Trámite online disponible en Sistema Formularios ISP.</p> <p>– Acceso al sistema</p> <p>Si usted es usuario habilitado, ingrese al sistema en</p>

<https://formularios.ispch.gob.cl/> para realizar la solicitud de análisis y acceder posteriormente al informe de resultados con firma electrónica avanzada.

Si no cuenta con clave de acceso, solicítela al correo electrónico coordinacionredes@ispch.cl

– **Solicitud de clave**

Una vez realizada la solicitud, recibirá un formulario que deberá completar con la información del laboratorio requerida para obtener la clave de acceso.

La clave se entrega solo al director técnico del laboratorio.

– **Instrucciones de uso**

El paso a paso para el uso de la plataforma se encuentra en el documento “Manual para Generar Formularios online”, disponible en <https://formularios.ispch.gob.cl/>

2. **Trámite presencial:**

Procedimiento de envío, recepción y entrega de resultados:

– **Preparación de la muestra**

Reunir los antecedentes y documentación mencionados en el punto anterior.

– **Entrega de la muestra**

– **Entrega presencial:** Dirigirse a la Sección de Gestión de Muestras del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), Av. Marathon N°1000, Ñuñoa, Santiago.

– **Envío por estafeta o courier:** Entregar la documentación requerida en la recepción, donde se proporcionará un comprobante de recepción.

– **Horarios de atención**

Toma de muestras (ISP): no aplica.

Recepción de muestras:

– Lunes a jueves: 08:00 a 17:00 hrs.

– Viernes: 08:00 a 16:00 hrs.

– **Pago de arancel**

– Cancelar el arancel en la caja ubicada en el mismo piso, presentando el comprobante de recepción.

– Exentos de pago: pacientes o instituciones con convenio vigente, presentando comprobante de recepción.

– **Proceso analítico y entrega de resultados**

El laboratorio del ISP efectuará el análisis correspondiente. En los casos en que se emita informe de resultados, estos podrán ser entregados mediante las siguientes modalidades:

– **Retiro presencial:** por paciente o cliente, con comprobante de recepción.

	<ul style="list-style-type: none"> – Retiro por terceros: requiere fotocopia de la cédula de identidad del paciente, poder notarial simple que autorice al tercero y comprobante de recepción. – Retiro por estafetas: autorizados y validados anualmente por el ISP para cada centro asistencial. – Envío desde Oficina de Partes ISP: a usuarios o a provincias, a la dirección indicada en el formulario. – Descarga en línea: a través de la plataforma de Formularios en Línea http://www.ispch.cl/servicios-en-linea <p>– Consultas online a través de plataforma SIAC https://siac.ispch.gob.cl/ES/AtencionCiudadana/OIRS</p>
Tiempo realización	8 días hábiles.
Vigencia	De acuerdo con la indicación médica.
Costo	Ver Costo
Marco legal	Reglamento sobre Notificación de Enfermedades Transmisibles de Declaración Obligatoria y su Vigilancia